

Proring®-Band

Gastroplastie Verticale Calibrée

Anneau en silicone

- > Calibrage de la poche de gastroplastie
- > Coéloscopie

Ring made of silicone

- > *Calibration of the gastroplasty pouch*
- > *Laparoscopy*



**SURGICAL
IOC®**

L'alliance pour l'innovation

Proring®-Band


Gastroplastie Verticale Calibrée




1. Agrafage circulaire.
Circular stapling.



2. Agrafage linéaire.
Linear stapling.

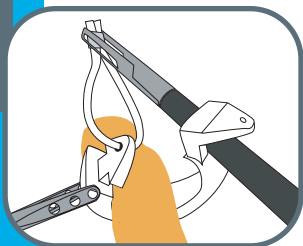

3. Passage de l'anneau Proring®-Band autour de la poche gastrique.
Proring®-Band ring setting around the gastric pouch.

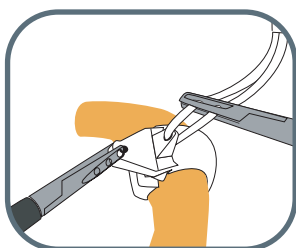

4. Fermeture de l'anneau Proring®-Band.
Proring®-Band ring closing.



5. Calibrage de la poche gastrique avec l'anneau Proring®-Band.
Pouch banding with Proring®-Band ring.



6. Contrôle radio post-opératoire.
Post-operative radiography

Anneau Proring®Band :

- > Constitué de Silicone non-adhérent et radio-opaque.
- > Introduction par un trocart de 12 mm.
- > Manipulation et positionnement facile dans la fenêtre gastro-gastrique (mémoire de forme, système de verrouillage).
- > Forme et géométrie garantissant un calibrage stable et reproductible de la poche gastrique.

Composition du kit :

- 1 anneau Proring®-Band pour Gastroplastie en silicone, opaque aux rayons X avec sa boucle de traction
- 1 fil de suture 2/0 non résorbable en polyester tressé revêtu anti-adhérent avec aiguille courbe 3/8 de 30 mm, pointe ronde
- 1 pince de préhension
- 1 scalpel
- 1 règle centimétrique

Documents annexes :

- 1 notice d'utilisation
- Vignettes pour identification et traçabilité
- 1 carnet de Suivi Patient

Réf.	L (mm)	Ø* (mm)
PB 500	50	15,7
PB 550	55	17,5
PB 600	60	19,1

*diamètre interne de l'anneau fermé
*internal diameter of the closed ring

Proring®-Band Ring :

- > Made of non-adherent and X-ray opaque Silicone.
- > Introduction through a 12 mm trocar.
- > Easy handling and setting in the gastro-gastric window (memory shape, locking system).
- > Shape and geometry ensuring a stable and reproducible calibration of the gastric pouch.

Composition of the kit :

- 1 Proring®-Band Gastroplasty Ring made of X-ray opaque silicone with traction loop
- 1 non-absorbable interlaced 2/0 suture thread made of anti-adherent coated polyester, with 3/8 curved, round tip, 30 mm needle
- 1 grasping tweezer

- 1 scalpel
- 1 centimetric ruler


Additional documents :

- 1 instructions for use
- Stickers for identification and traceability
- 1 patient leaflet

Bibliographie :

- > P.H. Lointier, MD, PhD ; Ph. H. Verdier, PhD ; A. Verdier, MD. The LM Proring-Band and Left Approach in Laparoscopic Vertical Banded Gastroplasty : Preliminary Results in 44 Cases. *Obes Surg* 2002 ; 672-678.
- > Chirurgie Bariatrique sous Laparoscopie : Technique de la gastroplastie verticale calibrée. P. Lointier. *Le journal de Coelio-chir*, N°42, juin 2002, 85-92
- > J.S. Azagra, M.Goergen ; chirurgie de l'obésité morbide : trucs et ficelles pour réussir la gastroplastie verticale calibrée en 2003. *Le journal de coelio-chir*, N°46, juin 2003, 14-16.
- > P.H. Lointier, D. Nocca, P.R.H. Verdier, R. Mordefroid, N. Radhi, R. Schütz ; comparaison de la technique du cerclage gastrique et de la gastroplastie verticale calibrée sur la perte de poids des obèses morbides. *Le journal de coelio-chir*, N°46, juin 2003, 77-83.

AIDE OPÉRATOIRE ASSISTANT

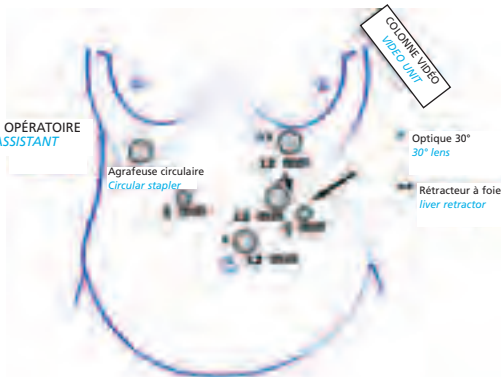

Exemple de position des Trocars
Example of trocars position

> Commandes | Orders :

Tél. +33(0)4 77 91 42 00 | Fax. +33(0)4 77 91 42 01

SURGICAL - IOC® - 88 rue Marengo
42000 SAINT - ETIENNE | FRANCE
Internet : www.surgical-ioc.com



**SURGICAL
IOC®**
L'alliance pour l'innovation